

ComfortSling - Kantoside

TUOTENRO 20111

ComfortSling on kertakäyttöinen kantoside lyhytkestoiseen käyttöön. Joustavan, pehmeän materiaalin ansiosta side sopii useimmille henkilöille koosta riippumatta, ja sitä voidaan käyttää korvaamaan useita perinteisiä kantositeitä. Pehmeä ja joustava olkahihna vähentää yleisesti esiintyvää niskaan kohdistuvaa rasitusta, mikä parantaa kantositeen käyttömukavuutta. Joustava materiaali mukautuu käsivarren pituuden mukaan kyynärpästä ranneniveleen. Pehmeä peukalonauha pitää kantositeen paikallaan ja käsivarren oikeassa asennossa.

ComfortSling -kantoside toimitetaan 12 kappaleen pakkauksessa.

Koko: Yksi koko, sopii sekä oikeaan että vasempaan käsivarteen.

Käyttöaiheet: Olkapään/käsivarren kuormituksen vähentäminen akuutista vammasta/traumasta johtuen.

Vasta-aiheet: Potilailla, joilla on sinus caroticus -oireyhtymä, tulee välttää ortosin aiheuttamaa painetta sinus carotis alueella.

Sovittaminen: Aseta käsivarsi siteeseen ja varmista, että peukalonauha kulkee peukalon alta kuvan osoittamalla tavalla. Vie olkahihna selän yli ja säädä se sopivan mittaiseksi kiinnittämällä hihna punaiseen nappiin sopivasta napinlävestä. Varmista, että olkahihna on kiinnitetty nappiin hyvin. Hihna voidaan kiinnittää joko napin sisäpuolelle tai ulkopuolelle. Hihna voidaan leikata sopivan pituiseksi.

Materiaali: 88 % Polyesteriä, 12 % Elastaania. Ei sisällä lateksia.

Pesuhjeet: ComfortSling -kantoside on kertakäyttöinen, vesipesua ei suositella. Tahroja voidaan pyyhkiä pehmeällä, kostealla liinalla tai pestä varovasti käsin haaleassa vedessä.

Koko	Väri	Tuotenumero
Universaalikoko	Valkoinen	20111-09-50



Fits both
Adult & Child

