

# Elbo 2.0 - Kynärpäortoosi

TUOTENRO 20205

Elbo 2.0-kynärpäortoosia käytetään käsivarren ja kynärpään stabilisoimiseen toimenpiteen tai trauman jälkeen liikeradan rajoittamiseksi tai immobilisointiin. Ortoosin ekstensiota ja fleksiota voidaan säätää 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105° och 120°, säätöväli on 10°. Ekstensiosuunnan rajoitusta voidaan säätää 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75° och 90°. Olka- ja kynärvarren kiskossa on pituuden teleskooppisäätö. Ortoosin pituutta voidaan säätää 37–46 cm. Olkahihnaa voidaan käyttää vähentämään kuormitusta. Elbo 2.0 on miellyttävän tuntuinen käyttää ja se pysyy käsivarressa tukevasti ja liikkumatta.

**Käyttöaiheet:** Vakaat kynärpäämurtumat, distaalissa olkaluun, säteen ja proksimaalisessa kynärluussa. Immobilisaatio leikkauksen jälkeen jänneiden ja nivelsiteiden korjaukseen. Käytetään kuntoutukseen kynärpäämurtumien konservatiivisten ja kirurgisten hoitojen jälkeen. Kynärpään dislokaatio ja sublukaatio. Krooniset kynärpäävammat. Kynärpään hyperekstensio. Trauman jälkeinen hoito.

**Vasta-aiheet:** Ei tunnettuja vasta-aiheita.

**Materiaali:** Kevyestä alumiiniseoksesta valmistettu teleskooppikisko. Polykarbonaattiliitos turvalukolla. Kestomuovista valmistetut osat hihnojen pituuden säätöön. Lämpölaminoitu pehmuste kaksikerroksisesta MTP:stä. Ei sisällä lateksia.

**Pesuhjeet:** Pese pehmustetut osat käsin haaleassa vedessä miedolla saippualla; Huuhtelee perusteellisesti. Kuivaa ilmassa, välttä äärimmäisiä lämpötiloja. Pese muoviosat miedolla saippualla haaleaan veteen kastetulla sienellä. Kuivaa liinalla. Älä käytä valkaisuinetta. Ei kemiallista pesua. Älä siilitä. Ei rumpukuivausta.

**Tarvikkeet:** Kädensija neutraaliasentoon.

Elbo 2.0, Telescopic Hand support, tilataan erikseen.

- Vasen art.no.: 20205-15-50

- Oikea art.no.: 20205-25-50

Koko		Tuotenro
Universaalikoko	Vasen	20205-10-50
Universaalikoko	Oikea	20205-20-50



Kiskojen pituutta ja nivelen liikkuvuutta voidaan säätää yksilöllisesti potilaan mukaan.



Kädensija neutraaliasentoon, voidaan tilata erikseen.

Ortoosin pituus nivelen keskeltä	
Kynärvarsi	19 - 26 cm
Olkavarsi	18 - 21 cm



MD Class I CE