

# Jura Knee Immobiliser - Immobilisaatioortoosi

ART.NO 70624

Jura Knee Immobiliser käytetään polvinivelen immobilisointiin. Jura Knee Immobiliser on helppo säätää tarrakiinnityksellä. Ortoosissa on kolme osaa, jotka on helppo kiinnittää toisiinsa tarralla jalan koon mukaan. Ortoosin takaosassa on kaksi alumiinilastaa, ja se on muotoonmormeltu istuvaksi. Ortoosissa on myös kaksi lateraalista lastaa lisäämässä tukea. Lastat on helppo irrottaa ja niitä voi muotoilla. Niitä säädetään keskellä edessä olevan D-renkaan läpi kulkevalla tarranauhalla.

**Koko:** Saatavilla on neljä eri pituutta, yleiskoko, sopii sekä oikealle että vasemmalle polvelle.

**Käyttöaiheet:** Polvinivelen immobilisaatioon toimenpiteen tai trauman jälkeen.

**Vasta-aiheet:** Syvä laskimotukos. Älä levitä suoraan kosketukseen avoimen haavan kanssa. Mikä tahansa tunnettu allergia ja/tai yliherkkyys jollekin tuotteen koostumuksessa luetellulle materiaalille.

**Materiaali:** 30 % polyuretaania, 20 % nailonia, 20 % polyesteriä, 20 % alumiinia, 9 % polypropeenaa, 1 % asetaalia. Lateksivapaa.

**Pesuhje:** Käsinpesu, rumpukuivaus. Älä käytä valkaisuainetta tai huuhteluainetta. Ei kemiallista pesua. Älä silitä tai rumpukuivaa. Kiinnitättarranauha pesun aikana.

**Mittaaminen:** Mitataan senttimetreinä proksimaalisesti polvilumpiosta, istuen ja polvi hieman taivutettuna.

Koko	Pituus, cm	Polven ympäryys, cm	Tuoteno
JTI/16	40	28-47	70624-00-40
JTI/20	50		70624-00-50
JTI/24	60		70624-00-60
JTI/28	70		70624-00-70

