

# Stadig - Nilkkaortoosi

## TUOTENRO 80120

Tukeva nilkkaortoosi, jota voidaan käyttää akuuttien vammojen tai nilkkanivelen pitkäkestoisen instabiliteetin hoitoon. Ortoosia voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa. Pehmeä pehmuste muotoutuu nilkan mukaan, on miellyttävän tuntuinen ja tukee hyvin. Muovilastat ovat yleiskäyttöisiä ja sopivat sekä oikeaan että vasempaan jalkaan. Tarranauhat pitävät ortoosin halutussa asennossa. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi ortoosia tulisi käyttää nauhankengän, kuten kävely- tai jumppakengän kanssa.

**Koko:** Universaalikoko.

**Käyttöaiheet:** Vaikeat ja kohtalaiset akuutit lateraaliset ja mediaaliset nilkan nyrjähdykset (toiminnallinen ja postoperatiivinen hoito), malleolaarinen murtuma, post-op pinnoitetuille murtumille

**Vasta-aiheet:** Ei tunnettuja vasta-aiheita.

**Materiaali:** Nylon, Polyesteri, PU-vahto, Lasikuitu  
Ei sisällä lateksia.

**Pesuhjeet:** Poista vaahtomuovipehmuste ja kantapään kiinnitysnauhat lastasta. Sulje tarranauhat. Pese nauhat käsin haalealla vedellä (enintään 35°C) ja miedolla saippualla. Huuhtelee vedellä ja anna sen kuivua huoneenlämmössä. Älä silitä. Puhdista muovikuoret kostealla liinalla. Varmista, että materiaalit ovat täysin kuivia ennen uudelleen käyttöä.



MD Class I CE

Koko	Väri	Tuotenro
Universaalikoko	Musta	80120-00-50